

تعليمات إجراء اختبار كوفيد-19 Quidel™ QuickVue في المنزل بدون وصفة طبية

تم ترخيص استخدام هذا الاختبار من قبل إدارة الدواء والغذاء (FDA) بموجب تفويض الاستخدام في حالات الطوارئ أو ما يُعرف بـ (EUA) للاستخدام المنزلي دون وصفة طبية مع أخذ عينات مسحة الأنف الأمامية (nares) بشكل ذاتي ومباشر للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 14 عام فما فوق. كما تم ترخيص استخدام هذا الاختبار للاستخدام المنزلي دون وصفة طبية مع أخذ عينات مسحة الأنف الأمامية من قبل شخص بالغ للأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر.

غسل اليدين قبل إجراء الاختبار بالماء والصابون أو باستخدام مطهر اليدين. تأكد من جفاف اليدين بالكامل قبل البدء.

- **الخطوة 1: تحديد مفردات مواد الاختبار**
 - الأنبوب (السائل داخل الأنبوب)
 - حامل الأنبوب
 - المسحك
 - شرائط الاختبار
- **الخطوة 2: وضع الأنبوب في الفتحة المخصصة لحامل الأنبوب**
 - قم بإزالة الغطاء من أنبوب واحد
 - ضع الأنبوب في حامل الأنبوب
- **الخطوة 3: مسح فتحتي الأنف**
 - قم بإزالة الغلاف عن المسحة (لا تلمس رأس المسحة)
 - أدخل المسحة برفق لمسافة 1/2 إلى 3/4 بوصة (أنش) في فتحة الأنف
 - حرّك المسحة بإحكام في حركة دائرية حول الجدار الداخلي لفتحة الأنف 4 مرات على الأقل.
 - كرر العملية في فتحة الأنف الأخرى باستخدام نفس المسحة
- **الخطوة 4: وضع المسحة في الأنبوب**
 - ضع المسحة على الفور في السائل داخل الأنبوب (تأكد من ملاستها قعر الأنبوب)
 - قم بتحريك المسحة 3 إلى 4 مرات
 - أترك المسحة في المحلول لدقيقة واحدة
- **الخطوة 5: إخراج المسحة من الأنبوب**
 - بعد مرور دقيقة واحدة، أخرج المسحة من الأنبوب عبر فرك رأس المسحة بالجدار الداخلي للأنبوب لإخراج أكبر قدر ممكن من السائل
 - تخلص من المسحة عبر رميها في سلة المهملات
- **الخطوة 6: فتح شريط الاختبار**
 - أفتح كيس شريط الاختبار عند الفتحة الصغيرة بعناية وأمسك بشريط الاختبار كما هو محدد
- **الخطوة 7: وضع شريط الاختبار في الأنبوب**
 - ضع شريط الاختبار في الأنبوب على أن يكون اتجاه الأسهم الموجودة على الشريط متجهة للأسفل
 - أترك الشريط في الأنبوب لمدة عشر دقائق كاملة مع عدم الإمساك أو إخراج شريط الاختبار
- **الخطوة 8: إخراج شريط الاختبار من الأنبوب**
 - عند الدقيقة 10، أخرج شريط الاختبار من الأنبوب
 - ضع شريط الاختبار على سطح مستوٍ

في نتيجة الإختبار الموجبة، يجب أن يظهر خط أزرق وخط آخر وردي اللون. الخط الأزرق هو خط التحكم والخط الوردي هو خط الإختبار.

في نتيجة الإختبار السالبة، يجب أن يظهر خط أزرق اللون لكن بدون الخط الوردي

في نتيجة الإختبار غير الصحيحة، لن يظهر أي خط أو سيظهر الخط الوردي فقط. يجب إعادة الإختبار بدءاً من بداية إستخدام أنبوب جديد، ومسحة جديدة، وشريط إختبار جديد.

يمكن رمي مواد الإختبار في سلة المهملات. غسل اليدين أو إستخدام مطهر اليدين بعد إتمام كافة الخطوات.

لمشاهدة شريط فيديو يعرض كيفية إجراء الأختبار، يرجى زيارة الرابط التالي: https://quickvueathome.com/#video_howitworks

للحصول على المزيد من المعلومات حول أختبار كوفيد-19 Quidel™ QuickVue في المنزل بدون وصفة طبية، يرجى زيارة الرابط التالي: <https://quickvueathome.com/>