

غیر نسخہ شدہ کووڈ 19 ٹیسٹ Quidel™ QuickVue At-Home کے متعلق ہدایات

فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) نے یہ ٹیسٹ ہنگامی استعمال کے اختیار کے تحت بغیر نسخے کے 14 سال یا زیادہ عمر کے افراد کے ذاتی طور پر ناک سے بذریعہ روئی کی پھریری کے براہ راست حاصل کئے گئے نمونوں کے ساتھ گھر میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس ٹیسٹ کو بغیر نسخے کے 2 سال یا زیادہ عمر کے افراد کیلئے بالغ شخص کے ذریعہ ناک سے بذریعہ روئی کی پھریری کے حاصل کئے گئے نمونوں کے ساتھ گھر میں استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

ٹیسٹ کرنے سے قبل، اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئیے یا جراثیم کش محلول hand sanitizer کو استعمال کیجیے۔ یہ امر یقینی بنائیے کہ آپ کے ہاتھ مکمل طور پر خشک ہوں۔

- **مرحلہ نمبر 1: ٹیسٹ کٹ کا سازوسامان رکھنیے**
 - ٹیوبس (ٹیوب کے اندر مائع ہے)
 - ٹیوب ہولڈر
 - روئی کی پھریری
 - ٹیسٹ اسٹریپس
- **مرحلہ نمبر 2: ٹیوب کو ٹیوب ہولڈر میں رکھنیے**
 - ایک ٹیوب سے ڈھکن ہٹائیے
 - ٹیوب کو ٹیوب ہولڈر میں رکھنیے
- **مرحلہ نمبر 3: نتھنوں میں روئی کی پھریری لگائیے**
 - روئی کی پھریری کو اس کے غلاف سے نکالنیے (پھریری کے سرے کو مت چھوئیے)
 - روئی کی پھریری کو آہستگی سے نتھنوں میں 1/2 سے 3/4 انچ اندر لے جائیے
 - روئی کی پھریری کو نتھنے کی اندرونی سطح پر گردش حرکت میں کم از کم 4 مرتبہ مضبوطی سے ملنیے یا رگڑئیے۔
 - دوسرے نتھنے میں بھی روئی کی اس پھریری سے یہی عمل دہرائیے
- **مرحلہ نمبر 4: روئی کی پھریری کو ٹیوب میں رکھنیے**
 - روئی کی پھریری کو فوری طور پر ٹیوب کے اندر مائع میں رکھنیے (یہ بات یقینی بنائیے کہ یہ ٹیوب کی تہہ کو چھو رہی ہے)
 - پھریری کو 3 سے 4 مرتبہ گھمائیے
 - روئی کی پھریری کو محلول میں ایک منٹ کیلئے چھوڑ دیجیئے۔
- **مرحلہ نمبر 5: ٹیوب سے روئی کی پھریری کو نکالنیے**
 - ایک منٹ کے بعد، روئی کی پھریری کو ٹیوب میں سے اس کے سرے کو ٹیوب کی اندرونی دیوار سے رگڑتے ہوئے مائع کو ممکنہ حد تک نچوڑتے ہوئے نکالنیے
 - روئی کی پھریری کو ردی کی ٹوکری میں ضائع کر دیجیئے
- **مرحلہ نمبر 6: ٹیسٹ اسٹریپ کو کھولنیے**
 - ٹیسٹ اسٹریپ کی تھیلی کو چاک سے احتیاط سے کھولنیے اور ٹیسٹ اسٹریپ کو ایسے پکڑئیے جیسا کہ دکھایا گیا ہے
- **مرحلہ نمبر 7: اسٹریپ کو ٹیوب میں رکھنیے**
 - ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب میں اس طرح رکھنیے کہ اسٹریپ پر بنے ہوئے تیرنیچے کی جانب ہوں
 - اسٹریپ کو ٹیوب میں پورے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیجیئے اور ٹیسٹ اسٹریپ کو نہ چھڑئیے اور نہ نکالنیے۔
- **مرحلہ نمبر 8: ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب سے نکالنیے**
 - 10 منٹ کے بعد، ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب سے نکالنیے
 - ٹیسٹ اسٹریپ کو ایک ہموار سطح پر رکھنیے

ایک مثبت ٹیسٹ نتیجہ دونوں نیلی لکیر اور گلابی لکیر دکھائے گا۔ نیلی لکیر کنٹرول لائن ہے اور گلابی لکیر ٹیسٹ لائن ہے۔

ایک منفی ٹیسٹ نتیجہ صرف نیلی لکیر دکھائے گا اور گلابی لکیر نہیں دکھائے گا۔

ایک غلط ٹیسٹ نتیجہ یا تو کوئی لکیر نہیں دکھائے گا یا صرف گلابی لکیر دکھائے گا۔ ٹیسٹ کو شروع سے نئی ٹیوب، روئی کی نئی پھریری اور نئی ٹیسٹ اسٹریپ کو استعمال کرتے ہوئے دہرایا جائے۔

ٹیسٹنگ کے سازوسامان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاسکتا ہے۔ تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیے یا جراثیم کش محلول استعمال کیجیے۔

ٹیسٹ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کیلئے ملاحظہ کیجیے: https://quickvueathome.com/#video_howitworks

Quidel™ QuickVue At-Home OTC COVID-19 ٹیسٹ کی مزید معلومات کیلئے ملاحظہ کیجیے:
<https://quickvueathome.com/>