

## Instrucciones para el uso de Flowflex® - Prueba casera de antígeno para detectar COVID-19

*Flowflex®, prueba casera de antígeno para detectar COVID-19, está autorizada para uso doméstico sin necesidad de receta médica, y consiste en la recolección de muestras nasales (fosas nasales) con un hisopo nasal, de manera independiente en personas a partir de los 14 años y con asistencia de un adulto en los menores de edad. La prueba casera de antígeno Flowflex® está disponible para su uso únicamente en virtud de la disposición de Autorización de Uso de Emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).*

Antes de administrar la prueba, lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos. Asegúrese de que sus manos estén completamente secas.

- **Paso 1: Localice los componentes de la prueba**
  - Dispositivo de prueba
  - Hisopo nasal
  - Tubo de extracción
- **Paso 2: Saque el dispositivo de prueba**
  - Abra la bolsa
  - Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y plana.
- **Paso 3: Prepare el tubo de extracción**
  - Retire con cuidado la tapa de aluminio del tubo.
  - Perfore el círculo marcado en la caja de la prueba para formar un soporte y coloque ahí el tubo.
- **Paso 4: Tome la muestra de las fosas nasales**
  - Saque el hisopo de la envoltura (no toque la punta de algodón del hisopo).
  - Inserte con cuidado el hisopo en una de las fosas nasales (de ½ a ¾ de pulgada).
  - Frote firmemente el hisopo con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal **5 veces**. Tome la muestra aproximadamente en **15 segundos**. (Asegúrese de recolectar el drenaje nasal que pudo haber quedado en el hisopo)
  - Saque el hisopo de la primera fosa nasal y colóquelo directamente en la otra fosa.
  - Frote firmemente el hisopo con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal **5 veces**. Tómese aproximadamente **15 segundos** para recolectar la muestra. (Asegúrese de recoger el drenaje nasal que pudo haber quedado en el hisopo).
  - Saque el hisopo de la fosa.
- **Paso 5: Introduzca el hisopo en el tubo**
  - Introduzca de inmediato la parte de algodón del hisopo en el tubo.
  - Gire el hisopo durante **30 segundos**.
  - Rote el hisopo **5 veces** mientras aprieta el tubo.
- **Paso 6: Deseche el hisopo**
  - Retire el hisopo mientras aprieta el tubo.
  - Deseche el hisopo en la basura.
- **Paso 7: Cierre el tubo**
  - Coloque firmemente el gotero en el tubo.
  - Mezcle bien la solución golpeando suavemente el tubo con los dedos o girando la parte inferior del tubo.
- **Paso 8: Vierta la muestra en el dispositivo de prueba.**
  - Apriete suavemente el tubo y agregue **4 gotas** de la solución en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba (marcado con una S)
  - Deseche el tubo en la basura
  - Configure el temporizador en **15 minutos**

- **Paso 9: Lea los resultados**
  - Lea los resultados después de **CUMPLIDOS 15 minutos** (no lea los resultados después de 30 minutos).

**El resultado es positivo** si aparecen **dos líneas de color, la línea de control (C) y la línea de prueba (T).**

Nota: Cualquier línea de prueba (T) levemente visible en color rojo o rosa, con la línea de control (C) debe leerse como un resultado positivo.

**El resultado es negativo** si sólo es visible **la línea de control (C) y no la línea de prueba (T).**

**La prueba es inválida** si en el resultado **no aparece la línea de control (C).** Debe repetirse la prueba desde el principio con un nuevo hisopo y un nuevo dispositivo de prueba.

Los componentes de la prueba deben desecharse en la basura. Lávese las manos o utilice un desinfectante para manos después de completar los pasos.

Para ver un vídeo de demostración de la prueba, visite: [https://youtu.be/4\\_Mbbs9h5ds](https://youtu.be/4_Mbbs9h5ds)

Para obtener información adicional sobre la prueba casera de antígeno para detectar COVID-19 Flowflex®, visite: <https://flowflexcovid.com/>