

Flowflex® 코로나-19 항원 자가 검사 사용법

Flowflex® 코로나-19 항원 자가 검사는 비치방 가정용으로 승인된 검사 키트로 14 세 이상의 개인이 전방 비강(코 안쪽)에 면봉을 삽입하여 직접 채취하거나 성인이 2 세 이상 개인의 전방 비강(코 안쪽)에 면봉을 삽입하여 직접 채취한 견본을 사용합니다. Flowflex® 코로나-19 항원 자가 검사는 미국 식품의약국(FDA)의 긴급 사용 승인(EUA)에 따른 용도로만 사용됩니다.

검사하기 전에 비누와 물로 손을 씻거나 손 소독제를 사용하기 바랍니다. 손이 완전히 마른 상태인지 확인하기 바랍니다.

- **1 단계: 검사 키트의 모든 구성품 확인하기**
 - 검사 용기
 - 비강용 면봉
 - 추출물 원심분리 용액통
- **2 단계: 검사 용기 꺼내기**
 - 포장지를 엽니다.
 - 용기를 평평하고 깨끗한 표면에 놓습니다.
- **3 단계: 추출물 원심분리 용액통 준비하기**
 - 추출물 원심분리 용액통의 상단에 있는 은박을 조심스럽게 제거합니다.
 - 용액통 꽃을 곳을 만들기 위해 키트 상자 위의 구멍이 있는 원을 뚫고 용액통을 이곳에 세워 놓습니다.
- **4 단계: 면봉으로 견본 채취하기**
 - 면봉 포장지에서 면봉을 꺼냅니다. (면봉 끝을 만지지 않도록 주의할 것)
 - 면봉을 한쪽 코 안에 (½ 인치에서 ¾ 인치 정도) 조심스럽게 넣습니다.
 - 코 안쪽에서 원을 그리며 적어도 5 회 이상 세계 문지릅니다. 약 15 초 동안 표본을 채취하도록 합니다. (면봉에 묻힐 수 있는 모든 비강 분비물을 채취할 것)
 - 코에서 면봉을 꺼내 반대쪽 코 안쪽에 직접 넣습니다.
 - 코 안쪽에서 원을 그리며 적어도 5 회 이상 세계 문지릅니다. 약 15 초 동안 표본을 채취하도록 합니다. (면봉에 묻힐 수 있는 모든 비강 분비물을 채취할 것)
 - 코 안쪽에서 면봉을 빼냅니다.
- **5 단계: 면봉을 용액통에 넣기**
 - 즉시 면봉을 추출물 원심분리 용액통에 넣습니다.
 - 면봉을 30 초 동안 회전시켜 돌려줍니다.
 - 5 회 반복하여 용액통을 짜고 면봉을 회전시킵니다.
- **6 단계: 면봉 꺼내기**
 - 용액통을 짜면서 면봉을 꺼냅니다.
 - 면봉을 휴지통에 버립니다.
- **7 단계: 용액통 닫기**
 - 추출물 원심분리 용액통의 스포이드 뚜껑을 단단히 닫아 부착합니다.
 - 용액통의 아랫부분을 동그랗게 돌리거나 가볍게 두드려서 잘 섞이도록 합니다.
- **8 단계: 견본을 검사 용기에 분배하기**
 - 용액통을 조심스럽게 짜서 용액의 4 방울을 검사 용기의 견본 부분 (S 라고 표시되어 있음)에 잘 분배합니다.
 - 용액통을 휴지통에 버립니다.
 - 타이머를 15 분으로 설정합니다.

- 9 단계: 결과 판독하기
 - 15분이 모두 지난 후에 결과를 판독합니다. (30분 후의 결과는 판독하지 말 것)

양성 반응 결과는 대조군(C) 선과 검사(T) 선이 모두 나타납니다.

주지사항: 대조군(C) 선과 함께 나타난 모든 흐릿한 빨간색 또는 분홍색 검사(T) 선은 양성으로 판독합니다.

음성 반응 결과는 대조군(C) 선만 나타나고 검사(T) 선은 나타나지 않습니다.

잘못된 검사 결과는 대조군(C) 선이 나타나지 않습니다. 새로운 면봉과 새로운 검사 키트를 사용하여 처음부터 검사를 다시 반복해야 합니다.

모든 검사 용품은 휴지통에 버리기 바랍니다. 모든 단계를 완료한 후에는 손을 씻거나 손 소독제를 사용하기 바랍니다.

검사 시연 영상을 시청하려면, 다음을 방문하기 바랍니다: https://youtu.be/4_Mbbs9h5ds

Flowflex® 코로나-19 항원 자가 검사에 관한 더 자세한 정보는 다음을 방문하기 바랍니다: <https://flowflexcovid.com/>