

Flowflex® 新冠病毒抗原家庭检测盒使用方法

Flowflex® 新冠病毒抗原家庭检测盒已获授权用于非处方家庭使用，可用于检测 14 岁或 14 岁以上的个人自行收集的前鼻（鼻孔）拭子样本或成人从 2 岁以上儿童收集的前鼻（鼻孔）拭子样本。Flowflex® 新冠病毒抗原家庭检测盒仅限在美国食品和药物管理局 (FDA) 紧急使用授权 (EUA) 下使用。

测试前，请用肥皂和水或用消毒洗手液洗手。确保你的双手完全干燥。

- **第一步：找出测试盒中材料**
 - 检测卡
 - 鼻棉签
 - 提取缓冲液试管
- **第二步：取出检测卡**
 - 打开包装。
 - 将检测卡放在平整、干净的表面上。
- **第三步：准备提取物缓冲液试管**
 - 轻轻地从提取缓冲液试管顶部取下锡箔纸。
 - 打穿套件盒上的穿孔圆圈，形成试管架，并将试管放入试管支架中。
- **第四步：擦拭鼻孔**
 - 从棉签包装袋中取出棉签（不要触摸棉签的顶部）
 - 将棉签轻轻插入一个鼻孔内（ $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{3}{4}$ 英寸）。
 - 用棉签在鼻孔内壁上用力绕圈擦拭 **5 次**。用大约 **15 秒** 的时间来收集样本。（确保把棉签上可能存在的鼻腔排出物都收集起来。）
 - 从鼻孔取出棉签，然后直接插入另一个鼻孔。
 - 用棉签在另一个鼻孔内壁上用力绕圈擦拭 **5 次**。用大约 **15 秒** 的时间来收集样本。（确保把棉签上可能存在的鼻腔排出物都收集起来。）
 - 从鼻孔中取出棉签。
- **第五步：将棉签放入试管中**
 - 将棉签立即放入提取缓冲液试管中。
 - 将棉签旋转 **30 秒**。
 - 挤压试管并将棉签反复旋转 **5 次**。
- **第六步：取出棉签**
 - 挤压试管的同时取出棉签。
 - 将棉签扔入垃圾桶。
- **第七步：关上试管**
 - 将滴管头紧紧地放在提取缓冲液试管上。
 - 通过旋转或轻弹试管底部来使其完全混合。
- **第八步：将样品滴到检测卡上**
 - 轻轻挤压试管并将 **4 滴** 溶液滴入检测卡的样品孔（标有 **S** 处）中。
 - 将试管扔进垃圾桶。
 - 将计时器设定好 **15 分钟**。
- **第九步：读取结果**
 - 过去 **整 15 分钟** 后读取结果（不要在 **30 分钟** 后才读取结果）。

如果有可见的对照 (C) 线和检测 (T) 线，则为阳性检测结果。

注：任何微弱可见的红色或粉红色检测 (T) 线与对照 (C) 线应被解读为阳性。

如果有可见的对照 (C) 线，却没有可见的检测 (T) 线，则测试结果将为阴性。

如果**没有显示可见的控制 (C) 线**，则**检测结果**将为**无效**。如果要重新测试，应使用新试
管、新棉签和新检测卡从头开始测试。

可将测试材料扔进垃圾桶。完成这些步骤后请洗手或使用消毒洗手液。

如果要观看测试的演示视频，请访问：https://youtu.be/4_Mbbs9h5ds

如需更多关于 Flowflex® 新冠病毒抗原家庭检测息，请访问：<https://flowflexcovid/>