

## ہدایات برائے Flowflex® کووڈ - 19 اینٹی جن بوم ٹیسٹ

14 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد یا ان بالغ افراد کیلئے جو 2 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کی ناک کے اندرونی حصے سے روئی کی پھریری کے ذریعہ جمع کئے گئے نمونے حاصل کریں Flowflex® COVID-19 Antigen Home Test کے بغیر نسخے کے گھریلو استعمال کیلئے ٹیسٹ کی اجازت ہے۔ Flowflex® کووڈ-19 اینٹی جن بوم ٹیسٹ صرف فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) کے ایمرجنسی یا ہنگامی استعمال کی اجازت (EUA) کے تحت استعمال کیلئے ہے۔

ٹیسٹ کرنے سے قبل، اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئیے، یا جراثیم کش محلول بینڈ سینیٹائزر کو استعمال کیجیے۔ یہ امر یقینی بنائیے کہ آپ کے ہاتھ مکمل طور پر خشک ہوں۔

- **مرحلہ نمبر 1: ٹیسٹ کٹ کا سازوسامان تلاش کیجیے**
    - ٹیسٹ کیسٹ
    - ناک کا پھابا یا روئی کی پھریری
    - ایکسٹریکشن یا نکالنے والی بفر ٹیوب
  - **مرحلہ نمبر 2: ٹیسٹ کیسٹ کو ہٹائیے**
    - پیکج کو کھولئیے۔
    - کیسٹ کو ایک ہموار، صاف ستھری سطح پر رکھیے۔
  - **مرحلہ نمبر 3: ایکسٹریکشن یا نکالنے والی بفر ٹیوب کو تیار کیجیے**
    - ایکسٹریکشن یا نکالنے والی بفر ٹیوب کے اوپری حصے سے فوائل یا ورق نرمی سے ہٹائیے۔
    - ایک ٹیوب بولڈر بنانے اور ٹیوب کو ٹیوب بولڈر میں رکھنے کیلئے کٹ باکس پر سوراخ شدہ دائرے میں دبائیے۔
  - **مرحلہ نمبر 4: نتھوں میں روئی کی پھریری لگائیے**
    - روئی کی پھریری کو اس کے پیکٹ سے نکالیے (پھریری کے سرے یا نوک کو مت چھوئیے)
    - روئی کی پھریری نرمی سے ایک نتھے میں داخل کیجیے (1/2 سے 3/4 انچ)۔
    - روئی کی پھریری کو نتھے کی اندرونی سطح پر گھماتے ہوئے کم از کم 5 مرتبہ مضبوطی سے ملئیے یا رگڑئیے۔ نمونہ حاصل کرنے کیلئے کم و بیش 15 سیکنڈز لیجیے۔ (ناک میں کسی بھی مواد کو جمع کرنا یقینی بنائیے جو روئی کی پھریری پر موجود ہوسکتا ہے۔)
    - نتھے سے روئی کی پھریری نکالیے اور براہ راست دوسرے نتھے میں ڈالیے۔
    - روئی کی پھریری کو دوسرے نتھے کی اندرونی سطح پر گھماتے ہوئے کم از کم 5 مرتبہ مضبوطی سے ملئیے یا رگڑئیے۔ نمونہ حاصل کرنے کیلئے کم و بیش 15 سیکنڈز لیجیے۔ (ناک میں کسی بھی مواد کو جمع کرنا یقینی بنائیے جو روئی کی پھریری پر موجود ہوسکتا ہے۔)
    - نتھے سے روئی کی پھریری نکالیے۔
  - **مرحلہ نمبر 5: روئی کی پھریری کو ٹیوب میں رکھیے**
    - فوری طور پر روئی کی پھریری کو ایکسٹریکشن بفر ٹیوب میں رکھیے۔
    - روئی کی پھریری کو 30 سیکنڈز تک گھمائیے۔
    - ٹیوب کو نچوڑئیے اور روئی کی پھریری کو 5 بار گھمائیے۔
  - **مرحلہ نمبر 6: روئی کی پھریری ہٹائیے**
    - جب ٹیوب کو نچوڑ رہے ہوں تو روئی کی پھریری کو ہٹائیے۔
    - روئی کی پھریری کو تلف کر دیجیے۔
  - **مرحلہ نمبر 7: ٹیوب کو بند کر دیجیے**
    - ڈراپر کی نوک کو مضبوطی سے ایکسٹریکشن یا نکالنے والی بفر ٹیوب پر لگا دیجیے۔
    - ٹیوب کے نچلے حصے کو گھوماتے یا ہلاتے ہوئے اچھی طرح مکس کیجیے۔
  - **مرحلہ نمبر 8: ٹیسٹ کیسٹ پر نمونہ یا سیمپل ڈالنا**
    - ٹیوب کو آہستہ سے نچوڑئیے اور ٹیسٹ کیسٹ کے نمونے میں محلول کے 4 قطرے اچھی طرح ڈالیے (S کا نشان زدہ)۔
    - ٹیوب کو تلف یا ضائع کر دیجیے۔
    - 15 منٹ کیلئے ٹائمر سیٹ کیجیے۔
  - **مرحلہ نمبر 9: نتائج پڑھیے**
    - پورے 15 منٹ کے بعد نتائج پڑھیے (30 منٹ کے بعد نتائج نہ پڑھیے)۔
- مثبت ٹیسٹ کے نتیجے میں نظر آنے والی کنٹرول (C) لائن اور ٹیسٹ (T) لائن ہوگی۔

نوٹ : کنٹرول ( C ) لائن کے ساتھ ہلکا سرخ یا گلابی ٹیسٹ ( T ) لکیر کو مثبت کے طور پر پڑھنا چاہیے ۔

**منفی ٹیسٹ کے نتیجے میں نظر آنے والی کنٹرول (C) لائن اور نہ نظر آنیوالی ٹیسٹ (T) لائن ہوگی ۔**

ایک **غلط ٹیسٹ** کا نتیجہ کوئی **نظر نہ آنے والی کنٹرول ( C ) لائن دکھائے گا** ۔ ٹیسٹ کو روئی کی نئی پھریری اور نئی ٹیسٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے شروع سے دہرایا جائے ۔

ٹیسٹنگ کے سازوسامان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاسکتا ہے ۔ تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھوئے یا جراثیم کش محلول ہینڈ سینیٹائزر استعمال کیجئے ۔

ٹیسٹ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کیلئے ملاحظہ کیجئے : [https://youtu.be/4\\_Mbbs9h5ds](https://youtu.be/4_Mbbs9h5ds)

Flowflex® کووڈ - 19 اینٹی جن ہوم ٹیسٹ کے متعلق مزید معلومات کیلئے : <https://flowflexcovid.com/> ملاحظہ کیجئے ۔