

처방전 없이 구입 가능한 Quidel™ QuickVue 코로나-19 자가 검사 사용 설명서

이 검사는 14 세 이상의 개인이 전방 비강(코 안쪽)에 면봉을 삽입하여 직접 채취한 견본을 처방전 없이 가정에서 검사할 수 있도록 긴급 사용 승인 (EUA) 에 따라 미국 식품의약국 (FDA) 의 승인을 받았습니다. 이 검사는 또한 성인이 2 세 이상 개인으로부터 채취한 전방 비강 면봉 견본을 처방전 없이 가정에서 검사할 수 있도록 승인되었습니다.

검사하기 전에 비누와 물로 손을 씻거나 손 소독제를 사용하기 바랍니다. 손이 완전히 마른 상태인지 확인하기 바랍니다.

- **1 단계: 검사 키트의 모든 구성품 확인하기**
 - 용액통 (통 안에 액체가 들어있음)
 - 용액통 꽂는 곳
 - 면봉
 - 검사 측정지
- **2 단계: 용액통을 세워 놓는 곳에 꽂기**
 - 용액통 하나의 뚜껑을 열 것
 - 용액통을 세워 놓는 곳에 꽂을 것
- **3 단계: 면봉으로 견본 채취하기**
 - 면봉 포장지에서 면봉을 꺼낼 것 (면봉 끝을 만지지 않도록 주의할 것)
 - 면봉을 코 안쪽에 대략 ½인치에서 ¾인치 정도 조심스럽게 넣을 것
 - 코 안쪽에서 원을 그리며 적어도 4 회 이상 세게 문지를 것
 - 같은 면봉을 다른 쪽 코에도 넣고 이 과정을 똑같이 반복할 것
- **4 단계: 면봉을 용액통에 넣기**
 - 면봉을 용액통 안의 액체에 즉시 넣을 것 (면봉이 용액통 바닥에 닿는지 확인할 것)
 - 면봉을 3-4 회 저을 것
 - 면봉을 용액에 1 분 동안 그대로 둘 것
- **5 단계: 용액통에서 면봉 빼기**
 - 1 분 후, 면봉에 흡수된 액체를 최대한 많이 짜내도록 면봉 끝을 용액통 안쪽 벽에 문지르면서 꺼낼 것
 - 면봉을 휴지통에 버릴 것
- **6 단계: 검사 측정지 꺼내기**
 - 검사 측정지 포장지를 끝 쪽에서 조심스럽게 열고 표시된 대로 검사 측정지를 잡을 것
- **7 단계: 검사 측정지를 용액통에 넣기**
 - 측정지에 있는 화살표가 아래를 향하도록 검사 측정지를 용액통에 넣을 것
 - 측정지를 용액통에 10 분 동안 그대로 두고 측정지를 만지거나 빼지 말 것
- **8 단계: 용액통에서 검사 측정지 빼기**
 - 10 분이 지난 후, 용액통에서 검사 측정지를 뺄 것
 - 검사 측정지를 평평한 표면에 놓을 것

양성 반응 결과는 **파란색 선과 분홍색 선**이 모두 나타납니다. 파란색 선은 대조군을 나타내는 선이고 분홍색 선은 실험군을 나타내는 검사 선입니다.

음성 반응 결과는 **파란색 선만 나타나고 분홍색 선은 나타나지 않습니다.**

잘못된 검사 결과는 **아무 선도 나타나지 않거나 분홍색 선만** 나타납니다. 새로운 용액통, 면봉, 검사 측정지를 사용하여 처음부터 검사를 다시 반복해야 합니다.

모든 검사 용품은 휴지통에 버리기 바랍니다. 모든 단계를 완료한 후에는 손을 씻거나 손 소독제를 사용하기 바랍니다.

검사 시연 영상을 시청하려면, 다음을 방문하기 바랍니다: https://quickvueathome.com/#video_howitworks

처방전 없이 구입 가능한 Quidel™ QuickVue 코로나-19 자가 검사에 관한 추가 정보는 다음을 방문하기 바랍니다: <https://quickvueathome.com/>