

تعليمات إختبار المستضد المنزلي لكوفيد-19-Flowflex®

تم ترخيص الإختبار المنزلي لكوفيد-19-Flowflex® COVID-19 Antigen Home Test المخصص للإستخدام المنزلي وبدون وصفة طبية عن طريق أخذ عينات من مسحة فتحة الأنف الأمامية (nares) بشكل ذاتي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 14 عام فما فوق، أو للأطفال من سن عامين فما فوق وذلك بأخذ عينة من مسحة فتحة أنف الطفل من قبل شخص راشد. إن إختبار Flowflex® COVID-19 Antigen Home Test المنزلي مخصص فقط لاستخدامه بموجب تفويض الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) الصادر عن إدارة الغذاء والدواء (FDA).

قم بغسل يديك بالماء والصابون أو باستخدام مطهر اليدين قبل إجراء الإختبار. تأكد من جفاف اليدين بالكامل قبل البدء.

- **الخطوة 1: تحديد محتويات علبة الإختبار**
 - شريط الإختبار
 - مسحة الأنف
 - أنبوب لجمع العينة
- **الخطوة 2: إخراج مواد الإختبار من العلبة**
 - قم بفتح العبوة.
 - ضع العلبة على سطح نظيف ومستوي.
- **الخطوة 3: تحضير أنبوب لجمع العينة**
 - أنزع بعناية رقاقة الألمنيوم من أعلى أنبوب جمع العينة.
 - أدخل الأنبوب داخل الدائرة المثقوبة على علبة الإختبار لتشكيل حامل تضع فيه الأنبوب.
- **الخطوة 4: مسح فتحتي الأنف**
 - أخرج المسحة من الغلاف (لا تلمس رأس المسحة).
 - قم بإدخال المسحة برفق في إحدى فتحتي الأنف (1/2 إلى 3/4 أنج).
 - قم بتحريك المسحة بإحكام في حركة دائرية حول الجدار الداخلي لفتحة الأنف 5 مرات. يجب أخذ 15 ثانية تقريباً لجمع العينة. (تأكد من جمع أي إرتشاح للأنف قد يكون موجود على المسحة).
 - قم بإخراج المسحة من فتحة الأنف وضعها مباشرة في فتحة الأنف الأخرى.
 - حرّك المسحة بإحكام في حركة دائرية حول الجدار الداخلي لفتحة الأنف الأخرى 5 مرات. يجب أخذ 15 ثانية تقريباً لجمع العينة. (تأكد من جمع أي إرتشاح للأنف قد يكون موجود على المسحة).
 - أخرج المسحة من فتحة الأنف.
- **الخطوة 5: وضع المسحة في الأنبوب**
 - ضع المسحة على الفور في أنبوب جمع العينة.
 - قم بتحريك المسحة بحركة دائرية لمدة 30 ثانية.
 - اضغط على الأنبوب مع تحريك المسحة 5 مرات.
- **الخطوة 6: إخراج المسحة**
 - قم بإخراج المسحة أثناء الضغط على الأنبوب.
 - قم بالتخلص من المسحة ورميها في سلة المهملات.
- **الخطوة 7: إغلاق الأنبوب**
 - ضع غطاء القطارة بإحكام على أنبوب جمع العينة.
 - امزج جيداً بتدوير وتقليب الجزء السفلي من الأنبوب.
- **الخطوة 8: ضع عينات على علبة الإختبار**
 - اضغط برفق على الأنبوب لإخراج 4 قطرات من المحلول في المكان المخصص لوضع عينة الإختبار (المؤشر بالحرف S).
 - تخلص من الأنبوب عبر رميه في سلة المهملات.
 - اضبط المنبه لمدة 15 دقيقة.
- **الخطوة 9: قراءة النتائج**
 - قم بقراءة النتائج بعد مرور 15 دقيقة كاملة (لا تقرأ النتائج بعد مرور 30 دقيقة).

في نتيجة الإختبار الإيجابية، سيظهر خط مرني في منطقة خط التحكم (C) وخط آخر في منطقة خط الإختبار (T).

ملاحظة: أي خط إختبار مرئي أحمر أو وردي ظاهر بشكل باهت في منطقة خط الإختبار (T) مع خط منطقة التحكم (C) يدل على أن نتيجة الإختبار إيجابية.

في نتيجة الإختبار السالبة، سيظهر خط مرئي في منطقة خط التحكم (C) ولا يوجد خط آخر مرئي في منطقة خط الإختبار (T).

في نتيجة الإختبار غير الصحيحة، لن يظهر خط مرئي في منطقة خط التحكم (C). يجب إعادة الإختبار من البداية باستخدام مسحة جديدة وعدة إختبار جديدة.

يمكن رمي مكونات الإختبار في سلة المهملات. يجب غسل اليدين أو استخدام مطهر اليدين بعد إتمام كافة الخطوات.

لمشاهدة شريط فيديو يعرض كيفية إجراء الإختبار، يرجى زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/4_Mbbs9h5ds

للمزيد من المعلومات حول الإختبار المنزلي Flowflex® COVID-19 Antigen Home Test، يرجى زيارة الموقع: [/https://flowflexcovid.com](https://flowflexcovid.com)