

Instrucciones para la prueba COVID-19 de venta libre para hacerse en casa QuickVue de Quidel™

Esta prueba ha sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para uso en el hogar, sin receta médica, con muestras autoadministradas de hisopados de las fosas nasales inferiores para personas a partir de los 14 años. Esta prueba también está autorizada para uso doméstico, sin receta médica, con muestras de hisopados de las fosas nasales administradas por adultos a personas a partir de los 2 años.

Antes de administrar la prueba, lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos. Asegúrese de que las manos estén completamente secas.

- **Paso 1: Localice los materiales del kit de la prueba**
 - Tubos (el líquido está dentro del tubo)
 - Soporte para tubos
 - Hisopos
 - Tiras reactivas

- **Paso 2: Coloque el tubo en el soporte para tubos**
 - Quite la tapa de un tubo
 - Coloque el tubo en el soporte para tubos

- **Paso 3: Tome la muestra de las fosas nasales**
 - Saque el hisopo de la envoltura (no toque la cabeza del hisopo)
 - Introduzca cuidadosamente el hisopo entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$ de pulgada en la fosa nasal
 - Frote firmemente el hisopo con un movimiento circular alrededor de la pared interior de una fosa nasal por lo **menos 4 veces**
 - Repita el proceso en la otra fosa nasal con el mismo hisopo

- **Paso 4: Coloque el hisopo en el tubo**
 - Coloque inmediatamente el hisopo en el líquido del tubo (asegúrese de que esté en tocando el fondo del tubo)
 - Gire el hisopo de 3 a 4 veces
 - Deje el hisopo en la solución por **UN MINUTO**

- **Paso 5: Saque el hisopo del tubo**
 - **Después de un minuto**, saque el hisopo del tubo frotando la cabeza del hisopo contra la pared interior del tubo para exprimir la mayor cantidad de líquido posible
 - Eche todo a la basura

- **Paso 6: Obtenga la tira de la prueba**
 - Abra la envoltura de la tira reactiva cuidadosamente por la hendidura y sostenga la tira de la prueba como se indica

- **Paso 7: Coloque la tira reactiva en el tubo**
 - Coloque la tira reactiva en el tubo con las flechas de la tira apuntando hacia abajo
 - Deje la tira en el tubo durante **DIEZ MINUTOS COMPLETOS** y no manipule ni retire la tira reactiva

- **Paso 8: Retire la tira reactiva del tubo**
 - **A los 10 minutos**, retire la tira reactiva del tubo
 - Coloque la tira reactiva sobre una superficie plana

Un resultado positivo de la prueba debe mostrar **una línea azul y una línea rosada**. La línea azul es la línea de control; la línea rosada es la línea de la prueba.

Un resultado negativo de la prueba mostrará una **línea azul pero NO una línea rosada**.

Un resultado de prueba no válido mostrará ya sea **ninguna línea o sólo una línea rosada**. La prueba debe repetirse comenzando por el principio con un tubo nuevo, un hisopo nuevo y una tira reactiva nueva.

Los materiales de la prueba se pueden tirar a la basura. Lávese las manos o utilice un desinfectante para manos después de completar los pasos.

Para ver un video de demostración de la prueba, visite: https://quickvueathome.com/#video_howitworks

Para obtener información adicional sobre la prueba Covid-19 de venta libre para hacerse en casa QuickVue de Quidel™, visite: <https://quickvueathome.com/>